

Easy Temporary Cap*



Merkmale:
 Universell: Maßgefertigt für jedes Implantatsystem.
 Zeitsparend: Spart enorme Zeit beim Anfertigen von Provisorien
 Perfekt: Es ist ein perfekter Gingivaformer

Feature:
 Universal: It can be custom-made for every implant system.
 Time-Saver: It saves huge amount of time on making temporary prosthesis.
 Perfect: It is a perfect gingiva former.

 <p>Ø 3.5mm 4.5mm Für 3Q/4Q For 3Q/4Q</p>	<p>Easy Temporary Cap</p>  <p>Ø 4mm PQ-04</p>	<p>Easy Temporary Cap</p>  <p>Ø 5mm PQ-05</p>	<p>Easy Temporary Cap</p>  <p>Ø 6mm PQ-06</p>	<p>Easy Temporary Cap</p>  <p>Ø 7mm PQ-07</p>
 <p>Ø 5.6mm Für 5QS For 5QS</p>	<p>Easy Temporary Cap</p>  <p>Ø 8.5mm PQ-8.5</p>	<p>Easy Temporary Cap</p>  <p>Ø 9.5mm PQ-9.5</p>	<p>Easy Temporary Cap</p>  <p>Ø 10.5mm PQ-10.5</p>	
 <p>Ø 4.0mm Für QK For QK</p>	<p>Easy Temporary Cap</p>  <p>Ø 7mm PQ-QK</p>			

*zum Patent angemeldet patent pending

Anfertigen von provisorischen Prothesen Process of Making Temporary Prosthesis

Direkt im Anschluss an die Implantation erfolgt die Erstellung einer provisorischen Versorgung

After inserting the implant, temporary prosthesis will be made immediately




Platzieren der Easy Temporary Cap auf dem Abutment

Place Easy Temporary Cap on the abutment



Aufbringen von Komposit oder anderem Material zur provisorischen Versorgung auf die Easy Temporary Cap und anschließendes Formen

Place composite resin or other temporary prosthesis material on Easy Temporary Cap and make it shape as desired

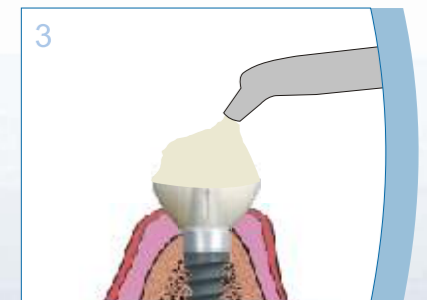

Aushärten der provisorischen Versorgung mit UV Licht

Using curing light to harden the temporary prosthesis



Die provisorische Versorgung ist nun fertiggestellt

The process of making a temporary prosthesis is finished





Easy Temporary Cap



Provisorische Versorgung in 5 Minuten!

Erstellen von provisorischen Versorgungen war noch nie so einfach

Temporary Prosthesis made in 5 minutes!

Making Temporary Prosthesis Never Been This Easy

